

Colocação e remoção de EPI's

SEQUÊNCIA DE REMOÇÃO DOS EPI

1

REMOVER AS LUVAS



2

REMOVER A BATA



3

HIGIENIZAR AS
MÃOS



4

REMOVER O
PROTETOR OCULAR



5

REMOVER A MÁSCARA
OU O RESPIRADOR N95



6

HIGIENIZAR AS
MÃOS



SEQUÊNCIA DE COLOCAÇÃO DOS EPI

1

HIGIENIZAR AS MÃOS



2

COLOCAR A BATA



3

COLOCAR A MÁSCARA
OU O RESPIRADOR N95



4

COLOCAR O
PROTETOR OCULAR



5

COLOCAR AS LUVAS

